

アルコール キューブ 取扱説明書

Cタイプ
トレー付
4輪キャスター



CNタイプ
トレー無
4輪キャスター



使用方法

セルフブレーキ付キャスター



1個当たり約9kgfの荷重がかかるとストッパー機構が自動的に作動します

高さ調整の手順



4本とも同じ高さに合わせ調整ピンを奥まで差し込んで下さい
(40mmピッチで160mm5段階調整可能)
キャスターは前方に突出した状態が正しい装着状態です。
逆向きで装着されますと転倒する恐れがありますのでご注意下さい。

使用上の注意

- 使用前は必ず医療機関、福祉用具専門員、介護支援専門員等に相談の上ご使用下さい。
 - ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
 - 使用前に高さ調整ピン・トレー等が固定されている事を確認の上ご使用下さい。
 - 脚部にはパイプ径の隙間から生じる振れがありますが、製品上の問題は有りませんので安心してお使い下さい。
 - 使用前はゴムグリップの減り具合を確認し、磨耗が激しい場合はご使用をお控えください。(Cタイプ)
 - トレーに強い衝撃を与えますと破損する恐れがありますのでしないでください。また、熱湯や刃物など怪我の恐れがある物は絶対に載せないでください。(Cタイプ)
 - トレーに物を載せて移動する際は落下しないように注意してご使用ください。(Cタイプ)
 - トレーを直接持って脱着しますと破損する恐れがありますので、必ず前・左右3箇所有る黒い樹脂キャッチを持ち脱着してください。(Cタイプ)
 - キャスター(車輪)の車軸や旋回部に異物(髪の毛・糸くず・ひも等)が絡まないように注意して下さい。
 - 高さを調整する際は必ず平坦な場所で行って下さい。
 - 転落の恐れがある場所(階段のそば・床面の開口部のそばなど)での使用は十分注意して下さい。
 - 急加速や急停止、急激な回転などは転倒の恐れがありますのでしないで下さい。
- 本製品のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で2~3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。

Cタイプ・CNタイプ	
寸法	幅480×奥行510×高さ705~865mm(40mmピッチ)
重量	6.7kg(Cタイプ) 5.7kg(CNタイプ)
仕様	Φ150キャスター(前)・Φ50セルフブレーキ付キャスター(後)
トレー	耐荷重10kg(静荷重) 耐熱温度110度
材質	ステンレス(本体)・ポリウレタン、天然ゴム(グリップ)・ポリプロピレン(トレー)

製造元

株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6
TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082

<http://www.aruko.co.jp/> E-mail: seiko@aruko.co.jp

〈2011.6版〉