


アルコー 2段ハンドル固定歩行器 取扱説明書

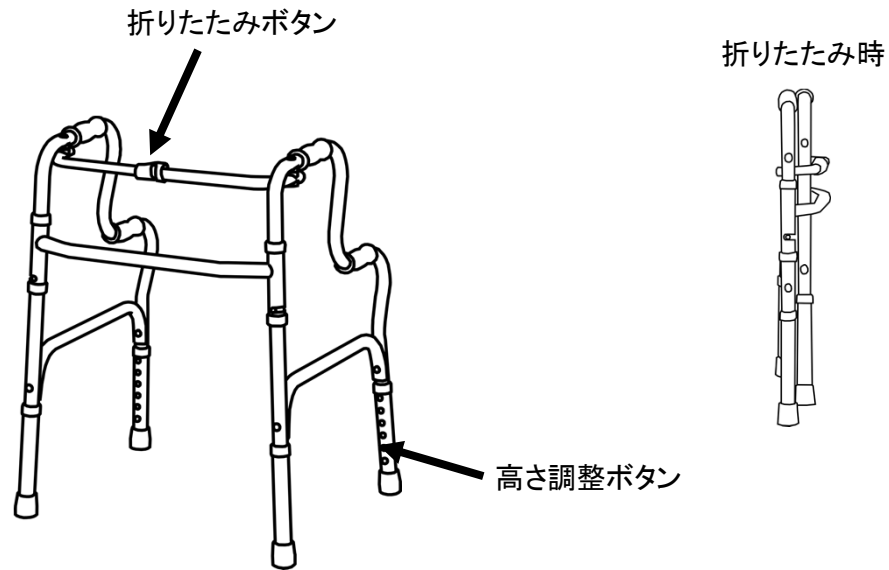

使用方法

開き方

グリップを持ち折りたたみボタンがパチンとロックするまで左右へ広げてご使用下さい。

折りたたみ方

折りたたみボタンを指で押しながら、グリップを内側へ回転させるように折りたたんで下さい。

高さ調整

高さ調整ボタンを指で押しながらスライドさせ、ご使用に最適な高さに合わせて下さい。

使用上の注意

- 使用前は必ず医療機関、福祉用具専門員、介護支援専門員等に相談の上ご使用下さい。
- 本製品は屋内用歩行器ですので他の用途には使用しないで下さい。
- ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
- 使用前に各ボタンがロックされている事を確認の上ご使用下さい。
- 広げる時や折りたたむ時には手指を挟まないように注意して下さい。
- 転落の恐れがある場所(階段のそば・床面の開口部のそばなど)での使用は十分注意して下さい。
- 事故・ケガの原因になりますので危険が予想される場所では使用しないで下さい。
- 体調不良の時や飲酒・薬物などにより感覚や判断力が正常でない時は使用しないで下さい。
- 破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。そのままで使用すると重大な事故につながる可能性があります。
- 本製品のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で2~3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。

アルコー 2段ハンドル固定歩行器	
寸法：	幅445 (グリップ内) 590~610 (脚部) ×奥行き485~495 (脚部) ×高さ740~865 (上部グリップ) 510~635mm (下部グリップ) 6段階調整式
重量：	2.6kg 材質：アルミニウム製

製造元

株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6

TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12

TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082

http://www.aruko.co.jp/ E-mail: seiko@aruko.co.jp

<2021.7.16第2版>