

# アルコー110型 リネン車兼避難車 取扱説明書



## 特徴

- リネン袋をはずした時に避難車として御使用出来ます。
- 幌布はターポリン両面防水型を使用しています。

## 取扱い上の注意

- ① エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ② 150kg以上の積載は破損の原因になりますのでお控え下さい。
- ③ ケガの恐れがありますので、開閉時にパイプの切断面には直接手を触れないで下さい。
- ④ 指をはさまないように扉の開閉時にはお気をつけて下さい。
- ⑤ 避難車としてお扱いになる場合はリネン袋をはずして下さい。

## 株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6  
TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915  
物流センター〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12  
TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082  
<http://www.aruko.co.jp/> E-mail: seiko@aruko.co.jp

〈2017.6 第1版〉