

アルコール13B型取扱説明書

使用上の注意

- 使用前には必ず医療機関、福祉用具専門員または介護支援専門員（ケアマネージャー）などに相談の上ご使用ください。
- ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
- 転倒の恐れがありますので床面(路面)が平らで段差・障害物及び溝や凹凸のない場所でご使用ください。
- 転落の恐れがある場所(階段のそば・床面の開口部のそばなど)での使用は十分注意して下さい。
- 急加速や急停止、急激な回転などは転倒の恐れがありますのでしないで下さい。
- キャスター(車輪)の車軸や旋回部に異物(髪の毛・糸くず・ひも等)が絡まないように注意して下さい。使用中にキャスター（特に前輪）が回転しなくなると転倒する恐れがありますので注意して下さい。
- ノブネジが確実に締まっているか確認の上ご使用下さい。
- 使用後のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布でから拭きして下さい。ひどい汚れの場合には、中性洗剤をぬるま湯で2～3%に薄め柔らかい布をひたし、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。

使用方法

- 高さ調整をする時は、横部分のノブネジを緩めて体に合った高さにあわせてノブネジをしっかりと締めて下さい。
- ブレーキレバーを手前に引くとブレーキが効きます。
- ブレーキ調整の方法　ブレーキ調整ネジを緩めるとブレーキレバーの握りこみ量が少なくなり、締めると多くなります。左右のタイヤが同時に効くように調整して下さい。

