

取扱説明書

アルコール歩行器1型・SH型用オプション

イルリガードル棒セット 酸素ポンベ架(500ℓ)

イルリガードル棒セット

取付方法

- ①歩行器上部の平角パイプ(16mm×32mm)にコの字曲げをした金具を挿し込みます。
- ②ノブネジにてしっかりと締め付けます。
- ③イルリガードル棒を金具に挿し込み、任意の高さに調節した後ノブネジにて締め込みます。

取扱い上の注意

- 定期的にノブネジのゆるみがないかをご確認のうえ使用して下さい。
- 点滴以外の目的に使用しないで下さい。
- 本製品はアルコール1型及びSH型のみに取り付けることができます。
- 歩行器が著しく斜行するなどする場合は本製品の使用を中止して下さい。

酸素ポンベ架(500ℓ)

取付方法

- ①歩行器フレーム下の丸パイプにポンベ架金具下側のコの字部分を架けます。
- ②歩行器上部の平角パイプ(16mm×32mm)にポンベ架金具上側を引っ掛けます。
- ③ノブネジをしっかりと締め付けます。
- ④酸素ポンベを挿入し、ガタツキ防止用のノブネジを締めて下さい。

取扱い上の注意

- 定期的にノブネジのゆるみがないかをご確認のうえ使用して下さい。
- 酸素ポンベ(500ℓ)以外の物は使用しないで下さい。
- 本製品はアルコール1型及びSH型のみに取り付けることができます。
- 歩行器が著しく斜行するなどする場合は本製品の使用を中止して下さい。

S H 医 療 器 械 器 具 製造元
アルコール在宅介護医療訓練器械

株式会社 星光医療器製作所

〒578-0901 東大阪市加納5丁目11番6号
TEL: 072-870-1912 (代)
FAX: 072-870-1915

URL <http://www.aruko.co.jp/>
E-mail: seiko@aruko.co.jp

ご不明な点は本社営業部までお問い合わせ下さい

2017.8第2版