

アルコー 6型W 取扱説明書



使用方法

- ① 幅調整をする時は、前部分上下のノブねじを緩めて体に合った幅に調整してからノブねじを確実に締め付けてください。
上部のノブねじは先端部がパイプの穴に入っているようにになっていますので、必ずご確認のうえ締め付けてください。
- ② 高さ調整をする時は、横部分のノブねじを緩めて体に合った高さに合わせてノブねじを確実に締め付けて下さい。

使用上の注意

- 使用前は必ず医療機関、福祉用具専門員、介護支援専門員等に相談の上ご使用下さい。
 - ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
 - 屋外や湿気の多い所での保管は製品劣化や故障の原因となりますので絶対にしないで下さい。
 - 段差のある場所では使用しないで下さい。
 - マットが固定されていないと大変危険です。使用前や高さ調整後には必ずノブネジが緩んでいないかを確認して下さい。
 - キャスター・ビスなどの緩みやガタツキがないか定期的に確認して下さい。
 - キャスター(車輪)の車軸や旋回部に異物(髪の毛・糸くず・ひも等)が絡まないように注意して下さい。
 - 高さを調整する際は必ず平坦な場所で行って下さい。
 - 転落の恐れがある場所(階段のそば・床面の開口部のそばなど)での使用は十分注意して下さい。
 - 急加速や急停止、急激な回転などは転倒の恐れがありますのでしないで下さい。
- 本製品のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で2～3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。

アルコー 6型W

寸法：幅530～590×奥行き700×高さ730～910mm ×重量10.2kg

仕様：Φ110自在キャスター

材質：スチール製メラミン焼付塗装仕上(本体)・ウレタンレザー(マット部)

製造元

株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6
TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915
物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12
TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082
<http://www.aruko.co.jp/> E-mail: seiko@aruko.co.jp