

アルコー 入浴用踏台・浴槽内椅子

91型・92型・191型・192型
95型・96型・195型・196型(高さ調節型)
291型・292型(吸盤付き)
295型・296型(吸盤付き・高さ調節型)

使用方法

- 浴槽の内外で踏台及び椅子としてお使いいただけます。
- 高さ調節は、各足のボタンを押して外側のパイプを上下にスライドさせて行って下さい。
(95型・96型・195型・196型・295型・296型)
- 吸盤は赤いチューブを上方向に引くと簡単に取り外せます。
(291型・292型・295型・296型)

使用上の注意

- 使用前は必ず医療機関、福祉用具専門員、介護支援専門員等に相談の上ご使用下さい。
- 重さ80kg以下でご使用下さい。
- 平坦で滑りにくく、ガタツキなく設置できる場所でご使用下さい。
- 使用前は足ゴム・吸盤・高さ調節ボタン等が固定されていることをご確認下さい。
- 座面への乗り降りにはゆっくりと行い、急激な力を加えないで下さい。
- 石鹸などが付いた足で座面に立たないで下さい。転倒する恐れがあります。
- 座面の端に足を置いたり、腰掛けたりしないで下さい。傾いたり滑ったりして転倒する恐れがあります。
- 浴槽内で使用されると不安定になる場合がありますので、吸盤付きでない商品は、別売りの吸盤をお買い求めの上ご使用下さい。
- 劣化を防ぐために使用後は浴槽から取り出し水気をきり、直射日光を避けた風通しの良い場所で保管して下さい。石鹸等が付着しているとカビの原因になりますので、よく洗い流してから保管して下さい。
- 沸き出し口付近など高温になる場所に置かないで下さい。やけどや劣化の原因になります。
- 製品に異常が発見された場合は直ちに使用を中止し、販売店・製造元にご連絡下さい。

お手入れの方法

- 日常のお手入れはやわらかい布と薄めた中性洗剤での布拭きで行って下さい。ブラシ類やアルコール及び塩素系洗剤を使用すると、製品表面の傷みやカビ発生の原因になります。
- お手入れの後は洗剤が残らないように洗い流し、直射日光を避けた風通しの良い場所で乾燥させて下さい。

株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6

TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12

TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082

<http://www.aruko.co.jp/> E-mail: seiko@aruko.co.jp