


# アルコー Kids(キッズ) 取扱説明書

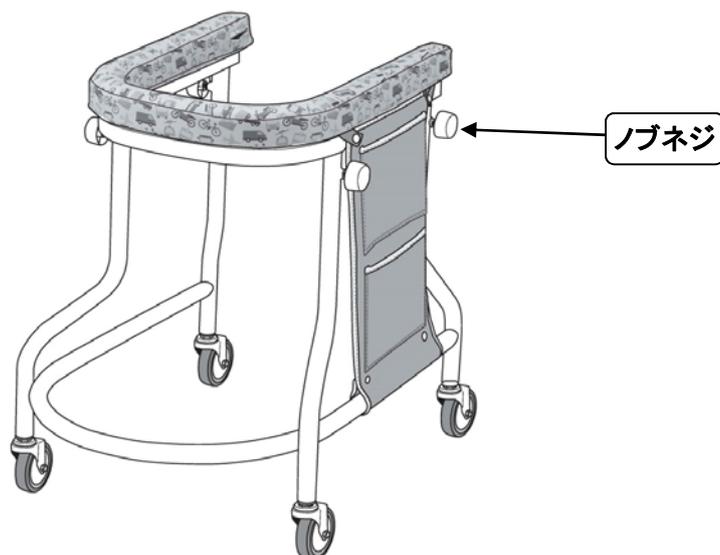

## 高さ調整方法

- ①ノブネジを緩めてください。
  - ②使用に適したマット高さでノブネジを締め付けて下さい。
- ※使用前にはノブネジが確実に締まっている事を確認して下さい。

## ⚠ 使用上の注意 必ずお守り下さい

- 使用前は必ず医療機関、専門相談員等に相談の上ご使用下さい。
- 本製品は歩行車ですので他の用途には使用しないで下さい。
- お子さまを乗せたままで高さの調整等を行わないで下さい。
- 2人以上のお子さまを同時に乗せないで下さい。
- シートの上等に立ち上がらないで下さい。
- ストーブやアイロンなどヤケドの危険があるものの近くで使用しないで下さい。
- 商品の分解・修理・改造などを行わないで下さい。
- 使用前にキャスターやネジ類・部品等が固定されている事を確認の上ご使用下さい。
- 肘置マットはノブネジで確実に固定された状態でお使い下さい。
- 転落・転倒の恐れがある場所では使用を避けるか、必ず保護者の方が付き添い注意して下さい。
- お子さまが使用される際は、必ず保護者の方が付き添い注意して下さい。思わぬ行動でけがや事故をされる恐れがあります。
- キャスター(車輪)の車軸や旋回部に異物(髪の毛・糸くず・ひも等)が絡まないように注意して下さい。
- 高さを調整する際は必ず平坦な場所で行って下さい。
- 急加速や急停止、急激な回転などは転倒の恐れがありますのでしないで下さい。
- 本製品のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で2~3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。
- 破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。そのまま使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

### ■製品仕様■

寸法: W455 × D710 × H620~770mm

車輪: φ75自在(4輪)

材質: スチール(本体)

人工合皮/ウレタン(肘置きマット)

最大使用者体重: 80kg 重量: 9.2kg

## 株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6

TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12

TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082

http://www.aruko.co.jp/ E-mail: seiko@aruko.co.jp