
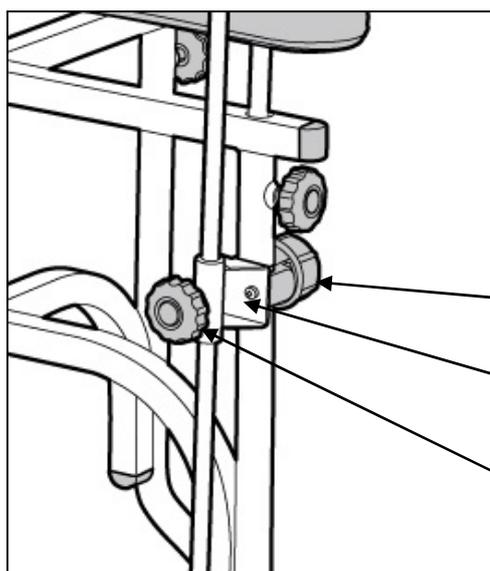


# アルコールクローバー用ガートル棒セット 取扱説明書

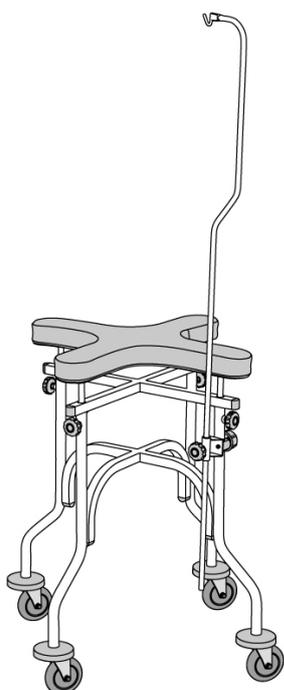

本体固定ノブネジ

ガートル取付金具

高さ調整ノブネジ

## 使用方法

- ①本体固定ノブネジを完全に緩めて外して下さい。
  - ②ガートル取付金具の中にあるU字型部品を外して下さい。
  - ③歩行車本体縦パイプをU字型部品とガートル取付金具で挟んで下さい。
  - ④本体固定ノブネジを締めて取付けて下さい。
  - ⑤ガートル棒を挿し込み高さ調整ノブネジで固定して下さい。
- ※使用前にはノブネジが緩みなく固定されている事を確認して下さい。

## ⚠ 使用上の注意 必ずお守り下さい

- 使用前は必ず医療機関、福祉用具専門員、介護支援専門員等に相談の上ご使用下さい。
- 本製品は「アルコールクローバー」専用オプションですので、他の歩行車には使用しないで下さい。
- ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
- 使用前に各ノブネジが固定されている事を確認の上ご使用下さい。
- 本製品のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で2~3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。
- 破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。そのまま使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

### ■ 製品仕様 ■

材質: スチール製  
重量: 1kg

## 株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6  
TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915  
物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12  
TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082  
<http://www.aruko.co.jp/> E-mail: seiko@aruko.co.jp