

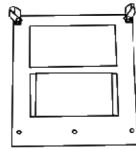


アルコー ニューセルフウォーカー 取扱説明書

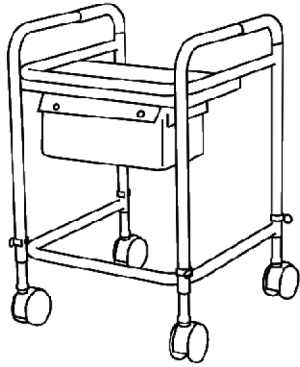

オプション
ポケットA

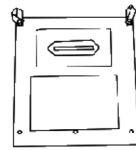


オプション
ポケットB



オプション装着例


使用方法

ストッパー機能

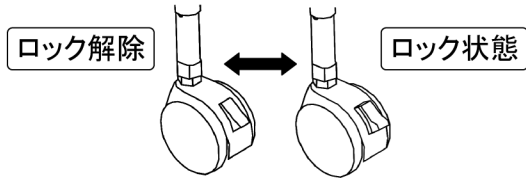

ボタンを押すとロックが切り替わります
(ロック時はオレンジ色が見えます)

高さ調整機能

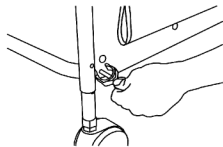

4本とも同じ高さに合わせ調整ピンを奥まで差し込んで下さい
(40mmピッチで6段階200mm調整可能)

⚠ 使用上の注意 必ずお守りください

- 使用前は必ず医療機関、福祉用具専門員、介護支援専門員等に相談の上ご使用下さい。
- 本製品は多彩な収納機能を装備した屋内用歩行補助器です。他の用途には使用しないで下さい。
- ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
- 使用前に高さ調整ピン・収納ポケット等が固定されている事を確認の上ご使用下さい。
- 使用前にキャスター取付部に緩みがない事を確認して下さい。緩みが生じた時はスパナで強く締め付けて下さい。
- 歩行する時は必ず引き出しを収納して下さい。
- 破損や転倒の恐れがありますので、ストッパーをロックした状態で歩行しないで下さい。
- テーブルに強い衝撃を与えますと破損する恐れがありますのでしないでください。また、熱湯や刃物など怪我の恐れがある物は絶対に載せないでください。
- テーブルに物を載せて移動する際は落下しないように注意してご使用ください。
- 破損の恐れがありますので、収納ポケット・引き出しには尖った物や刃物等は入れないで下さい。
- 破損や転倒の恐れがありますので制限重量を超える物を載せないで下さい。
(テーブル3kg・収納ポケット一面につき2kg・引き出し2kg)
- キャスター(車輪)の車軸や旋回部に異物(髪の毛・糸くず・ひも等)が絡まないように注意して下さい。
- 高さを調整する際は必ず平坦な場所で行って下さい。
- 転落の恐れがある場所(階段のそば・床面の開口部のそばなど)では使用を控えるか十分注意して下さい。
- 急加速や急停止、急激な回転などは転倒の恐れがありますのでしないで下さい。
- 本製品のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で2~3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。

アルコー ニューセルフウォーカー	
寸法:	幅505×奥行545×高さ680~880mm(6段階40mmピッチ)
重量:	9kg
仕様:	Φ80双輪キャスター(前)・Φ80ストッパー付双輪キャスター(後)
材質:	ステンレス(本体)・ポリウレタン、天然ゴム(グリップ)・ナイロンPVC(ポケット・引き出し)

製造元

株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6
TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915
物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12
TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082
http://www.aruko.co.jp/ E-mail: seiko@aruko.co.jp