


# アルコールポンベキャリア 取扱説明書

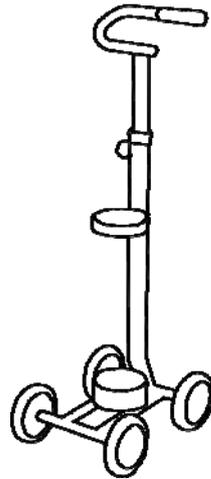

## 特徴

- $\phi$  130mmの大径車輪で屋内・屋外と使う場所を選びません。
- 前押し・後引きどちらでも使用出来ます。
- 適用ポンベサイズ: 500 $\text{L}$ 用

## ⚠ 使用上の注意 必ずお守り下さい

- 床面が凹凸状または段差がある場所での使用は、本体・キャスター等の故障や転倒事故の原因になりますので、その様な所では使用しないで下さい。
- 適用サイズ以外のポンベ、酸素ポンベ以外の物品を搬送することは故障・転倒事故の原因になりますので、お止め下さい。
- ポンベが上下部の筒の中に確実に挿入された状態でご使用下さい。
- グリップ高さ調節ノブネジが確実に締まっている事をお確かめの上ご使用下さい。
- 平坦な場所に置いて下さい。
- エレベーター等の乗り降りの際には、車輪・キャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。

### ■ 製品仕様 ■

寸法: W300 × D380 × H760~1100mm  
適用ポンベ: 500 $\text{L}$  (リング内径105mm)  
車輪:  $\phi$  130固定輪  
材質: スチール製 塗装・メッキ仕上げ  
重量: 4kg(単体)

## 株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6  
TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915  
物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12  
TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082  
<http://www.aruko.co.jp/> E-mail: seiko@aruko.co.jp