


# アルコールランドリーカート 取扱説明書

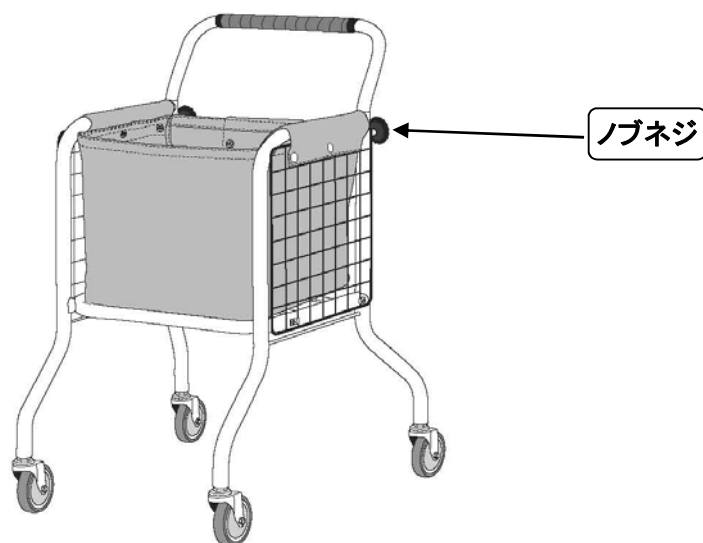

## 高さ調整方法

①ノブネジを緩めてください。

②使用に適したハンドル高さでノブネジを締め付けて下さい。

※使用前にはノブネジが確実に締まっている事を確認して下さい。

## ⚠ 使用上の注意 必ずお守り下さい

- ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
- 使用前にキャスターやネジ類・部品等が固定されている事を確認の上ご使用下さい。
- ハンドルはノブネジで確実に固定された状態でお使い下さい。
- 転落・転倒の恐れがある場所では使用を避けるか、必ず介護の方が付き添い注意して下さい。
- 認知症の方が使用される際は、必ず介護の方が付き添い注意して下さい。思わぬ行動でけがや事故をされる恐れがあります。
- 次のような時は使用しないで下さい。転倒し、けがの原因になります。
  - 飲酒後
  - 薬物等による酩酊状態
  - 睡眠薬服用後
  - 麻酔が効いた状態
  - その他の感覚や判断力が正常でない時
- キャスター(車輪)の車軸や旋回部に異物(髪の毛・糸くず・ひも等)が絡まないように注意して下さい。
- 高さを調整する際は必ず平坦な場所で行って下さい。
- 急加速や急停止、急激な回転などは転倒の恐れがありますのでしないで下さい。
- 本製品のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で2~3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。
- 破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。そのまま使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

### ■ 製品仕様 ■

寸法: W503 × D530 × H740~940mm

車輪: φ75自在(4輪)

材質: ステンレス(本体)

ナイロンPVC(バッグ)

最大使用者体重: 80kg 重量: 5.8kg

## 株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6

TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12

TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082

http://www.aruko.co.jp/ E-mail: seiko@aruko.co.jp