
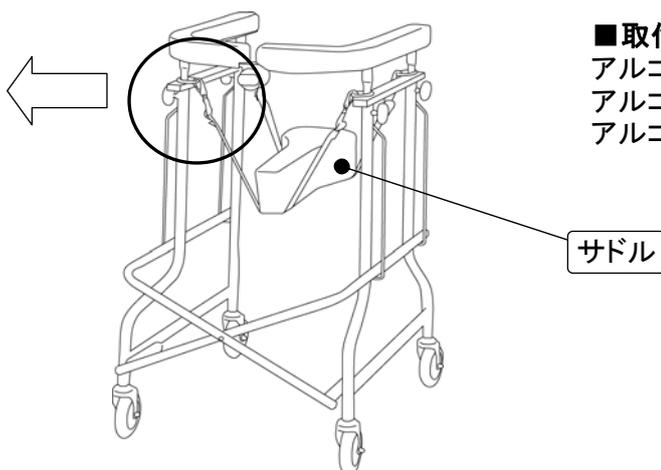


アルコール歩行車用オプション サドルセット 取扱説明書

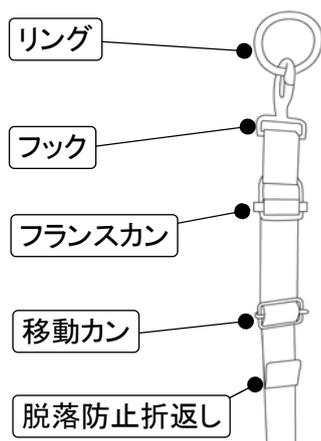

■取付可能機種
アルコール1型
アルコールXA型
アルコール3型(大)

■取付方法


- ①4ヶ所ある歩行車の高さ調節ノブネジを緩め、マット部をフレームから外して下さい。
- ②フレーム上部のマット穴位置に「リング」を置きます。(右図)
- ③マット支柱下端がサドルセット「リング」を通るようにマットをセットします。
- ④マット位置を合わせて高さ調節ノブネジを締めて下さい。
- ⑤ベルトがねじれないように「フック」を「リング」にかけます。

■ベルトの長さ調節方法

- ①「フランスカン」と「移動カン」を利用してベルトの長さを調節して下さい。
 - ②腰掛ける前には上から手で押すなどして、ベルトがずれない事を確認して下さい。
- ※「脱落防止折返し」が「移動カン」より抜けない範囲内で調節して下さい。

■使用方法

- ①歩行車後方2ヶ所の「フック」を外して歩行車内まで体を入れて下さい。
 - ②「フック」を「リング」に掛けて下さい。
 - ③「フック」が確実に掛かっている事が確認出来ましたら使用して下さい。
- ※フックの取付は介助の方が確実に行って下さい。

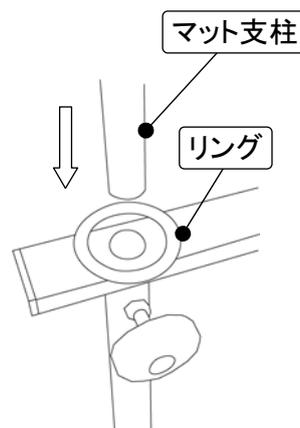

⚠ 使用上の注意 必ずお守りください

- 使用前は必ず医療機関、福祉用具専門相談員、介護支援専門員等に相談の上ご使用下さい。
- 本製品はアルコール歩行車専用オプションです。対象機種以外には絶対に使用しないで下さい。
- 使用時にサドル・ベルト等が足に接触する事が有りますので、痛みや違和感を感じられましたら直ちに使用を中止して下さい。
- 利用者の身体状況によっては介助の方が付き添い、安全に使用できるように配慮して下さい。
- 後方への移動は転倒し易くなりますので十分に注意して下さい。
- ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
- 使用前には各部品に緩みや欠落が無い事を確認して下さい。
- 取付けは説明書に従い正しく行って下さい。誤った取付けは故障や事故の原因になります。
- 歩行車の使用方法は歩行車付属の取扱説明書をお読み下さい。
- 金具には異物(髪の毛・糸くず・ひも等)が絡まないように注意し適宜清掃して下さい。
- 本製品のお手入れは水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で2~3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いて下さい。その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭き取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。
- 破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。そのまま使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

製造元

株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6

TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

物流センター 〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12

TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082

http://www.aruko.co.jp/ E-mail: seiko@aruko.co.jp

〈2011.11 初版〉