


# 取扱説明書

## アルコール歩行車用オプション ポンベ架Y/B

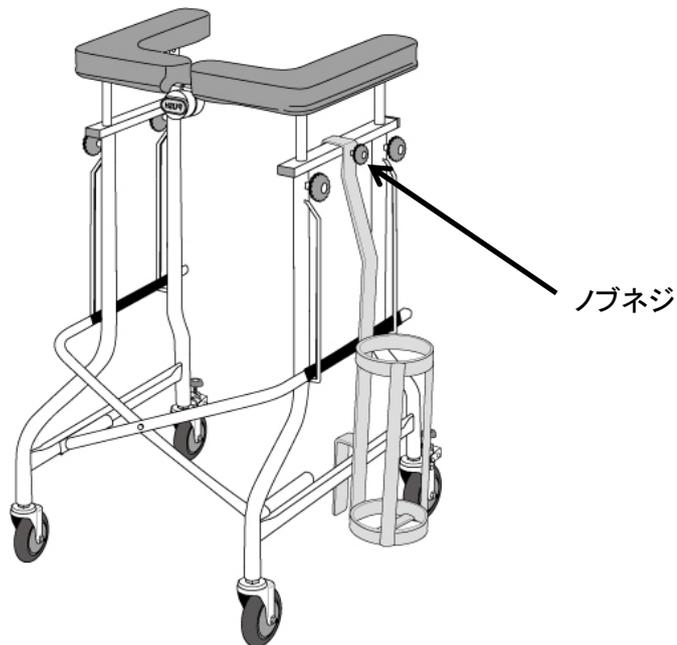

### 対応機種

1型・1B型・2型・SH型・SH型ブレーキ付・SH-X型・3型中・7型A中・7型C中・9型  
1S型・1S-C型・1S-T型・1S-X型・CL型A・CL型B・CL型C・1G型・1G-C型  
1G-T型・CG型・CG-T型・14型・30型

### 取付方法

- ① 歩行器フレーム下の丸パイプにポンベ架金具下側のコの字部分を架けます。
- ② 歩行器上部の角パイプにポンベ架金具上側を引っ掛けます。
- ③ ノブネジをしっかりと締め付けます。

### 取扱い上の注意

- 定期的にノブネジのゆるみがないかをご確認のうえ使用して下さい。
- 酸素ボンベ以外の物は使用しないで下さい。
- 歩行器が著しく斜行するなどする場合は本製品の使用を中止して下さい。

## 株式会社 星光医療器製作所

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6

TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

物流センター〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12

TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082

<http://www.aruko.co.jp/> E-mail: seiko@aruko.co.jp

〈2016.11 第1版〉