


アルコーステンレスシャワーチェア 業務用シャワー椅子・業務用シャワー椅子肘無し 取扱説明書

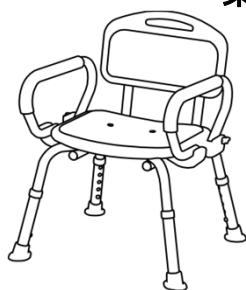

お買い上げいただきありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 警告 誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています

- 使用前に必ず医療機関やケアマネージャー、福祉用具専門相談員などに相談してください。
- 身体状況によっては必ず介助者が付き添い、十分に注意してください。
- 体重が100kgを越える方は使用しないでください。本体が破損するおそれがあります。
- 使用前にネジのゆるみ等、異常がないことを確認してください。
- 平らで安定した場所で使用してください。不安定な場所で使用すると転倒するおそれがあります。
- 脚部は4本とも同じ高さに設定してください。揃っていないと不安定になり転倒するおそれがあります。
- 脚部の高さ調節用プッシュボタンが確実にセットされていることを確認してください。
- 飛び乗ったり、故意にゆすったりしないで下さい。転倒してけがをするおそれがあります。
- 踏台代わりにして座面の上に立ったりしないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 手すり代わりにして身体を支えたり移動したりしないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 背もたれに手をかけ、支えにしての立ち座りや移動をしないでください。転倒するおそれがあります。
- 上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに体重をかけすぎないでください。転倒するおそれがあります。
- 改造や代用部品の使用はしないでください。本体の破損、使用中の事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意 誤った取扱をすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています

- 浴槽内など水の中に沈めて使用しないでください。パイプの腐食や転倒のおそれがあります。
- ゴム脚が外れたまま使用しないでください。使用中に滑ったり、床が傷つく原因になります。
- シャワーいす以外の用途で使用しないでください。
- 直射日光に当てたり、ストーブなどの火気に近づけないでください。変形・変質のおそれがあります。
- 破損や劣化を防ぐ為に定められた方法でお手入れをしてください。

部品一覧

最初にすべての部品が揃っていることを確認してください
(※の部品は肘無し商品には入っていません)


ネジ(短) 4本




背もたれ




脚パイプ ①②

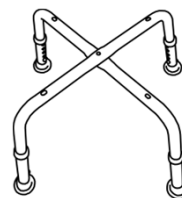

ネジ(長) 4本

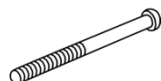

座面

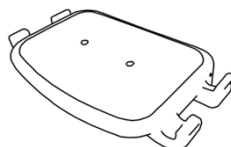

ネジ(黒) 1本



歯付座金 1枚



背もたれパイプ 2本



波形座金 9枚



※肘掛パイプ 2本



※ノブネジ 2本



組立方法


用意するもの・・・プラスドライバー（柄が太く力を入れて回しやすいもの）

1 座面に脚パイプ①②を取付ける

座面を裏返し×状の溝に刻印番号1と脚パイプの番号シール①を合わせます。

座面裏の刻印番号2と脚パイプの番号シール②を合わせます。

交差部中央の穴にネジ(黒)を波形座金と歯付座金をセットした状態で仮止めします。

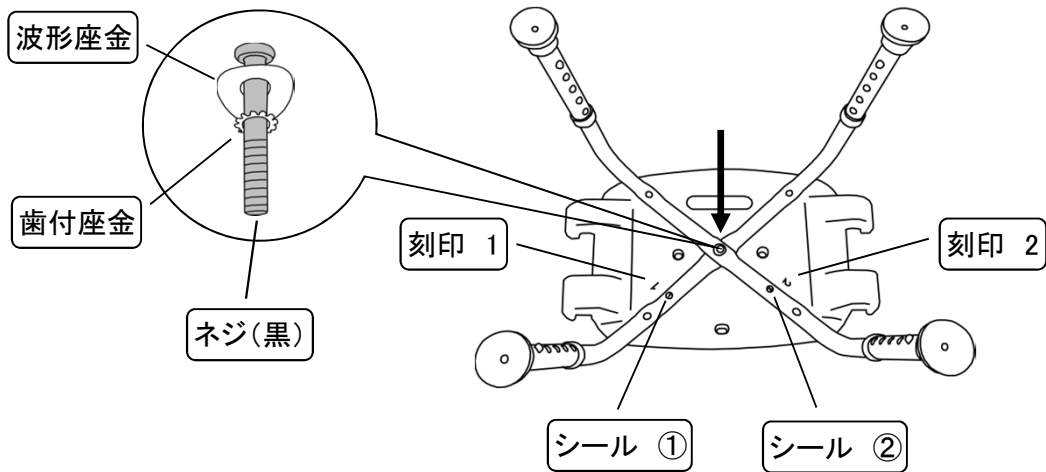


2 背もたれに背もたれパイプを取付ける

背もたれ裏面の溝に合わせて背もたれパイプ2本をセットします。

ネジ(短)と波形座金をセットしたもので4ヶ所仮止めします。


(長穴側は座面に取り付けます)

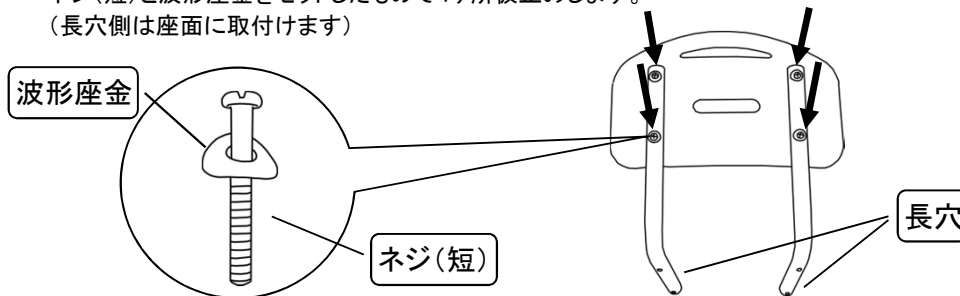

3 座面に背もたれを取付ける

背もたれが座面後側になる向きで、背もたれパイプと脚パイプのネジ穴を合わせます。

ネジ(長)と波形座金をセットしたもので4ヶ所仮止めします。

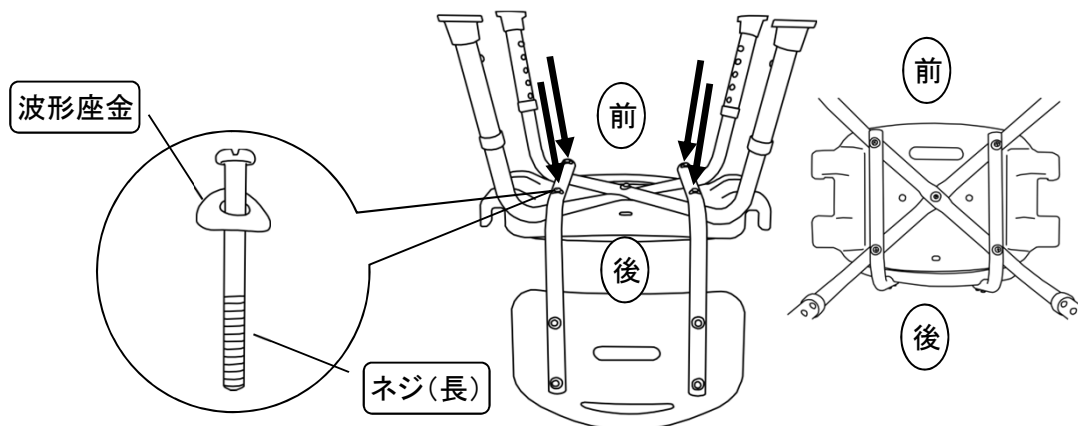


4 ネジを増し締めする

水平なところに立たせ、仮止めたネジ全てを強く締め付けます。
各部品がしっかりと固定されていることを確認してください。

5 肘掛を取付ける(肘無し商品・肘掛けを使用しない場合は不要です)

下図を参考に座面横のネジ穴と肘掛パイプの穴位置を合わせます。
ノブネジを挿し込み、ネジ部が見えなくなるよう奥まで締め付けます。

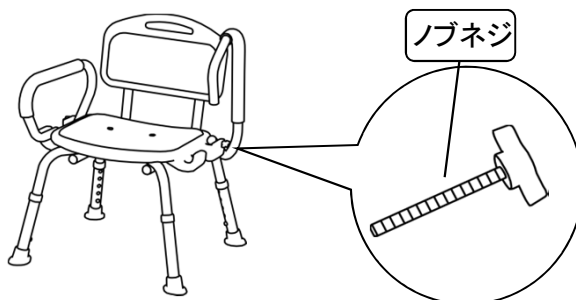


肘掛の使い方

肘無し商品・肘掛けを使用しない場合は不要です


1 肘掛を跳ね上げる

座面に荷重をかけた状態で肘掛を上
引き上げてください。

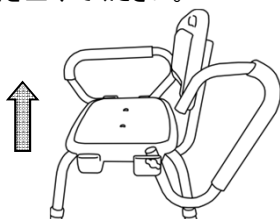

2 肘掛を下ろす(ロック機能は付いていません)

ゆっくりと下ろして最後にパチッと音がするまで
押し下げてください。

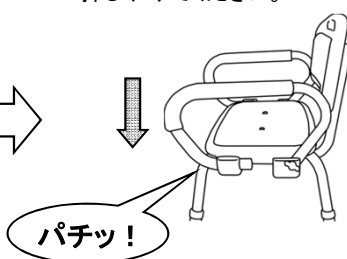

⚠ 注意


- 肘掛を上げ下げする時は手指をはさまないように注意してください。
- 肘掛にはロック機能は付いていません。完全に固定することは出来ませんので注意してください。
- 肘掛に体重を掛けすぎないでください。転倒の原因になります。
- 肘掛を持って持ち上げないでください。肘掛が開いて転倒したり破損するおそれがあります。

座面の高さ調節

座面の高さは5段階に調節することができます


1 プッシュボタンを押す

飛び出しているプッシュボタンを親指で
押してください。

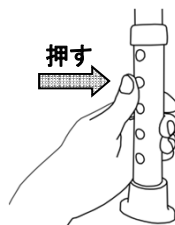

2 脚パイプをスライドさせる

プッシュボタンがカチッという音がして確実に
飛び出していることを確認してください。

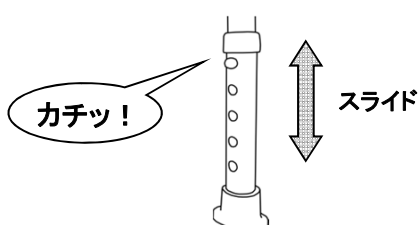

⚠ 警告

- 脚パイプは4本全て同じ高さに設定してください。
高さが揃っていないとガタついて転倒し、けがをする原因になります。
- 高さ調節をするときは指を挟まないように本体を横に寝かせて操作してください。
- プッシュボタンが確実にセットされていることを必ず確認してください。

お手入れ

お手入れの際に座面シート・背もたれシートを取外すことができます。

シートはワンタッチで取外すことができます。

- 1 座面及び背もたれの裏面から、はめ込み部を押すとシートがはずれます。
- 2 取付けるときはシートのはめ込み部を座面・背もたれの穴にあわせ、全体を上から押さえます。



⚠ 注意 末永くお使いいただくために以下のことをお守りください。

- お手入れは中性洗剤を水でうすめ、やわらかい布かスポンジに含ませてから汚れを取ってください。
- 汚れをとった後は、きれいな水で洗剤を洗い流し、乾いた布で拭きとり、かげ干しをしてください。
- 汚物等で汚れた場合はすみやかに洗浄してください。シミになるおそれがあります。
- 磨き粉、タワシ、研磨剤入りのスポンジなどは使用しないでください。製品劣化の原因になります。
- 酸・アルカリ性洗剤、有機溶剤は絶対に使用しないでください。製品が劣化したり破損する原因になります。
- 天日干しはしないでください。直射日光にあてると変質・劣化する原因になります。
- 使用後は水気を拭き取り、風通しのよい場所で保管してください。濡れたままの状態ではカビが発生する原因になります。

⚠ 注意 殺菌・消毒のために塩素系消毒薬を使用する場合は以下の内容に注意してください。

- 塩素系消毒薬には漂白作用や金属腐食性があります。
- 消毒薬に記載された用法をお守りください。
- 毒性の強いガスが発生しますので酸性溶液と混ぜて使用しないでください。
- 風通しをよくして換気を行いながら作業してください。
- 手荒れを防ぐ為にゴム手袋・ビニール手袋等をして作業してください。
- 高濃度での使用は避けてください。
- 使用は短時間とし消毒後は必ず水でよく洗い流してください。

仕様

サイズ	幅520～560X奥行440～460X高さ640～740mm(5段階) 座面高さ360～460mm 座面幅390X座面奥行300mm
重量	6kg
耐荷重	100kg
材質	フレーム・脚パイプ: ステンレス 座面・背もたれ: ポリエチレン 座面シート・背シート: EVA ゴム脚: 合成ゴム

製品に関するご意見・お問い合わせは下記まで

株式会社 **星光医療器製作所**

〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6

TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

URL <http://www.aruko.co.jp/> E-mail : seiko@aruko.co.jp