


アルコーEX/EXミニ 移動式平行棒

取扱説明書

このたびはアルコー製品をお買い上げいただきありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

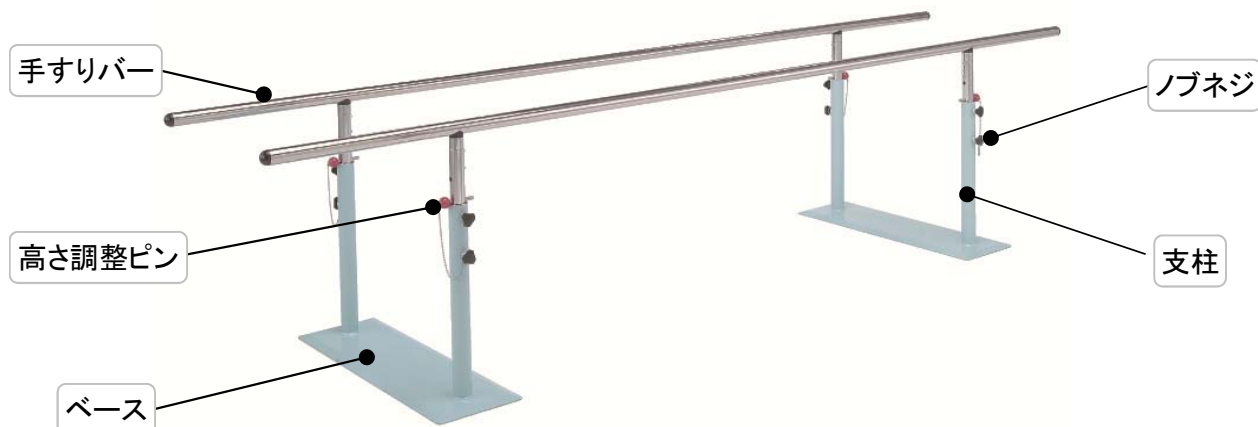

⚠ 警告

❗	●	使用前に必ず医療機関、介護支援専門員(ケアマネージャー)、福祉用具専門相談員などに相談して下さい。
	●	使用前にピンやノブネジなどの各部品類が緩んでいないかを確認して下さい。転倒、故障の原因になります。
	●	使用時は必ず病院スタッフや介助の方が付き添い注意して使用して下さい。転落、転倒による重大な事故になる恐れがあります。
	●	平行棒の支柱は4本全て同じ高さにして下さい。
	●	故障、破損の原因になりますので、平行棒の幅、高さ調整をするときは必ず全てのノブネジを緩めてから調整してください。
⊘	●	むやみに分解、改造はしないで下さい。故障、事故、けがの原因になります。
	●	破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。そのまま使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意

❗	●	屋内でのみ使用してください。
	●	お手入れは水に濡らした布か、柔らかい布でから拭きしてください。ひどい汚れの場合には、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。
⊘	●	ノブネジを緩めていない状態で高さや幅調整、設置場所からの移動はしないでください。故障、破損の原因になります。
	●	落としたり壁にぶつけるなど、乱暴な取扱をしないで下さい。故障や変形の原因になります。
	●	屋外や湿気の多い場所、火の近くや高温になる場所に放置、保管しないで下さい。サビの発生、故障、変形の原因になります。

1 組立方法

- ① ノブネジを緩めて支柱内側にネジ先が出ていない状態にしてください。(8か所)
- ② 手すりバーを支柱に差し込みます。
- ③ 使用に適した幅で高さ調整を行い、高さ調整ピンを差し込んでください。(4か所)
- ④ ノブネジを締めてから使用してください。(8か所)

2 高さや幅の調整方法

- ① 全てのノブネジを緩めて支柱が固定されていない状態にしてください。
- ② ベースをずらして幅を調整してください。
- ③ 使用に適した高さで高さ調整ピンを差し込んでください。
- ④ 全てのノブネジを締めてから使用してください。

株式会社 星光医療器製作所

〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6

TEL(072)870-1912 FAX(072)870-1915

URL <http://www.aruko.co.jp/> E-mail : seiko@aruko.co.jp