

アルコールSK型用 パーキングロックユニット

アルコールSK型 mini(ミニ)用 パーキングロックユニット 組立取扱説明書


各部の名称

パーキングロックレバー



梱包内容

梱包内容と下図イラストとの照合をして部品・付属品に不足が無い事を確認して下さい。

	【部品】	【付属品】		
アルコールSK 型用 パーキングロック ユニット	パーキングロック ユニット	①六角穴付ボルト (M6×70)・・・2	②サラバネ・・・2	③六角棒スパナ ・・・1
				
アルコールSK 型 mini (ミニ) 用 パーキングロック ユニット	パーキングロック ユニット	①六角穴付ボルト (M6×30)・・・2	②サラバネ・・・2	③六角棒スパナ ・・・1
				

安全上のご注意

△警告	
①	<ul style="list-style-type: none"> 本製品はアルコールSK型専用オプション、又はアルコールSK型 mini(ミニ)専用オプションです。互換性はありませんので、対応機種以外には使用しないで下さい。転倒や製品の破損の原因になります。 使用前に各部のねじ類が緩んでいないかを確認して下さい。転倒、故障の原因になります。
△注意	
①	<ul style="list-style-type: none"> 走行時には床面に凹凸や障害物がないか十分に注意して下さい。パーキングロックプレート のゴム足が干渉し転倒や破損の原因になります。 この製品の最大適応体重は80kgです。それ以上の力を加えると破損や故障の原因になります。 原則、操作は介助者の方が行って下さい。利用者が行う場合は操作が安全に行うことができ ることを確認してからご使用下さい。誤操作による転倒や破損の原因になります。 ご使用の際は必ず開口部分を利用者側に向けた状態で使用して下さい。側方向などから使用 すると転倒する原因となります。

△注意	
○	・パーキングロックをかけたままでの走行はしないで下さい。転倒し、ケガをする原因になります。
	・パーキングロックレバー先端に衣服やズボン等が引っ掛からないよう注意して下さい。着衣に絡まり転倒する原因になります。
	・パーキングロックレバーや接続部に緩みがある状態で使用しないで下さい。ロック機能が正常に作動せず、転倒や破損の原因になります。
	・パーキングロックレバーを掴んだ状態で立ち上がりの支えに使用しないで下さい。転倒や破損の原因になります。
	・本体をロックした状態で無理な荷重をかけた使用は行わないで下さい。転倒や破損の原因になります。
	・強い力でパーキングロックレバーを操作しないで下さい。転倒や破損の原因になります。
	・清掃にベンジンやシンナー、アルコール等の溶剤は使用しないで下さい。変質、変色、割れが発生する原因になります。

組立方法

アルコーSK型、アルコーSK型 mini(ミニ)それぞれ対応する歩行車に取り付けて下さい。

- ①【アルコーSK型】を裏返しに置いて右図矢印の【六角穴付ボルト】及び【サラバネ】2ヶ所を取り外して下さい。


取り外す【六角穴付ボルト】及び【サラバネ】の位置を間違わないように注意して下さい。



- ②【パーキングロックユニット】を【ベース】の穴位置と合わせ、付属品の【六角穴付ボルト】と【サラバネ】で取付けます。

⇒2ヶ所あります

ゴム足側が前方向になりますので、【パーキングロックユニット】の向きを間違わないように注意して下さい。

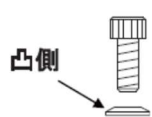


【サラバネ】には向きがあります。凸側が【六角穴付ボルト】の頭側になるように取付けて下さい。



【六角棒スパナ】を用いてしっかりと締付けて下さい。



 注意	組立の際は壁や床面を傷つけないように保護をしてから作業して下さい。
	手袋などを用い組立の際にケガをしないように注意して下さい。
	組立が完了する前にレバーの操作を行うと支柱が伸びます。ケガや破損の原因になりますので組立が完了するまで、レバーの操作を行わないで下さい。
	組立が完了する前にパーキングロックレバーの操作を行うとパーキングロックが作動します。手指を可動部に挟み込む原因になりますので組立が完了するまで、パーキングロックレバーの操作を行わないで下さい。
	全てのボルトを確実に固定して下さい。締め付け不足は故障・破損の原因になります。
	部品を紛失した場合は使用を中止し、販売店までご相談下さい。

使用方法

3. パーキングロックの使用方法



■パーキングロックの掛け方


- ・【パーキングロックレバー】を手前に引いて下さい。【ゴム足】がおりて地面に接地します。【パーキングロックレバー】から手を放しても、【ゴム足】が地面から離れないことを確認して下さい。

■パーキングロックの解除方法

- ・手前に引いた【パーキングロックレバー】を前方に押し込んで下さい。【ゴム足】が地面から離れて、パーキングロックが解除されます。

【パーキングロックレバー】を操作（ロック・解除）する際、矢印部分に手足や指を入れないように注意して下さい。挟まれてケガをする原因になります。



 注意	パーキングロックはあくまで歩行車への移乗、又は歩行車からの移乗を補助するためのもので、一般のブレーキとは用途が異なるので、歩行中の減速・停止ブレーキの目的では使用しないで下さい。転倒する原因になります。
	レバーを操作する際、可動部分に手足や指を近づけないで下さい。挟まれてケガをする原因になります。
	ゴム足は定期的に清掃し汚れを落として下さい。ロック時に滑る原因になります。
	パーキングロック時に強い力が加わると歩行車は簡単に動いたり、倒れたりする原因になるので注意して下さい。
	凹凸の床面ではパーキングロックを行わないで下さい。ロックせずに滑り、転倒する原因になります。

製造元

株式会社星光医療器製作所

本社・工場 578-0901 東大阪市加納 5-11-6

TEL 072-870-1912

FAX 072-870-1915

Email seiko@aruko.co.jp