


保証書付



アルコーステラ

取扱説明書

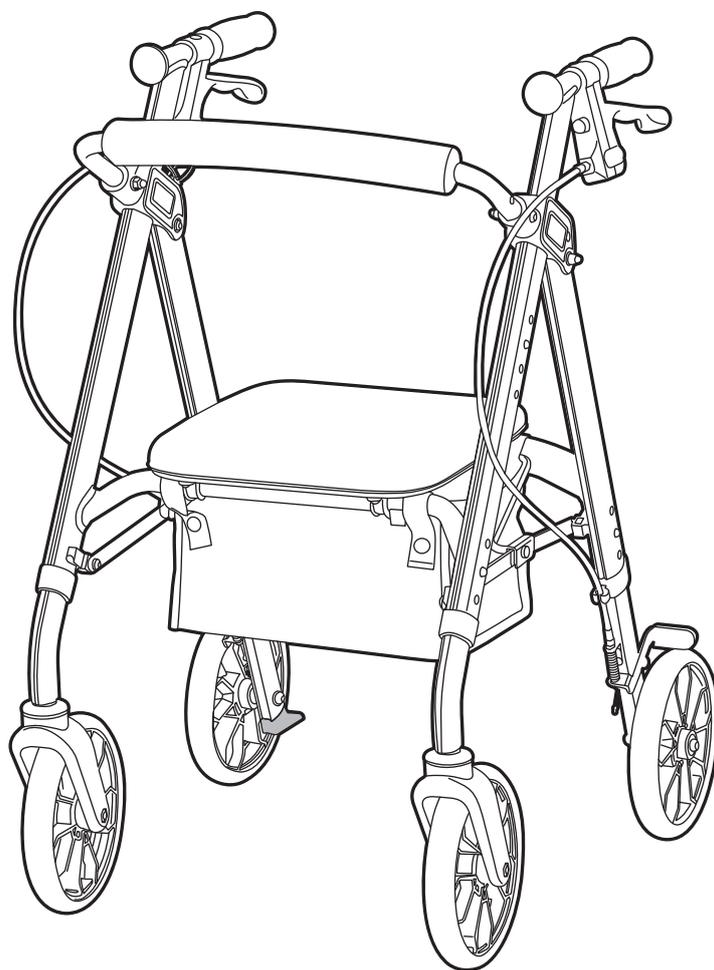

この度は、本製品をお買いあげいただき、ありがとうございました。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。

また、読まれたあとは大切に保管してください。

製品に関して不明な点や不具合がございましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
使用前の準備	5
使用方法	7
メンテナンス・保管	9
故障かな?と思ったら	10
仕様	10
保証とアフターサービス	11

安全上のご注意

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
-  **注意** 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

 記号は、気をつける必要があることを表しています。

図記号の意味

 記号は、してはいけないことを表しています。

 記号は、しなければならないことを表しています。

警告

	使用前に必ず医療機関、介護支援専門員（ケアマネージャー）、福祉用具専門相談員などに相談してください。	
	危険が予想される場所（階段や床面の開口部付近など）では使用を避けるか、必ず介護の方が付き添い注意してください。転落、転倒による重大な事故になる恐れがあります。	
	認知症の方が使用される際は、必ず介護の方が付き添い注意してください。思わぬ行動でけがや事故をされる恐れがあります。	
	破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。そのまま使用すると重大な事故につながる恐れがあります。	
	次のような環境で使用する場合は十分にご注意ください。転倒、事故、けがの原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ■坂道 ■バスや電車の中 ■交通の頻繁なところ、混雑しているところ ■踏切 ■溝や凹凸のある場所 ■夜間など見通しの悪いとき 	
	この製品は、自立歩行を補助するための歩行車ですので他の用途には使用しないでください。	
	次のような環境では絶対に使用しないでください。転倒、事故、けがの原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ■エスカレーター ■砂や泥のある場所 ■水たまり ■滑りやすい場所 ■階段 ■暗くて周囲が見えない場所 ■風の強いとき ■その他の危険が予想される環境 	
	次のようなときは使用しないでください。転倒、事故、けがの原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ■飲酒后 ■薬物等による酩酊状態 ■睡眠薬服用後 ■麻酔が効いた状態 ■その他の感覚や判断力が正常でないとき 	
	この製品の最大使用者体重は100kgです。体重100kgを超える方は使用しないでください。車体が破損・変形してけがをする恐れがあります。	
	収納バッグの中に、乳幼児やペットを乗せないでください。破損や思わぬ事故の原因となります。	
歩行のとき		買い物袋などの荷物を吊り下げる場合は、グリップ前輪側の買い物袋フック部分に吊り下げてください。2kg以上の荷物を吊り下げたり、買い物袋フック部分以外に吊り下げないでください。
		ハンドブレーキは、左右同時にかけてください。
		ハンドブレーキは必ず手で操作してください。他の物でブレーキ操作しないでください。
		段差や溝などにつまずくと、転倒の危険がありますのでご注意ください。また、段差には斜め方向から侵入しないでください。段差の手前で必ず一度止まり、十分注意して慎重に越えてください。
		車体は片手で操作しないでください。必ず両手で車体を操作し、バランスを保ちながらゆっくりと歩行してください。
座面について		グリップ以外の部分を持って歩かないでください。
		グリップの一方にだけ体重をかけて歩かないでください。
		グリップに寄りかからないでください。車体が動いたり、転倒する恐れがあり危険です。
		フレームに足をかけたり、乗った状態で使用しないでください。フレームの破損、転倒の原因となります。
		座面に座る前に、必ず駐車ロックをかけ、左右の後輪がしっかり固定されていることを確認してください。
座面に座るときおよび座面から立ち上がるときは、車体が動かないことを確認した上で、ゆっくりと身体を動かしてください。		
座面に座るときおよび座面から立ち上がるときにグリップを使用する場合は、必ず両方のグリップを握ってください。片方だけに寄りかかると、転倒の危険があります。		
座面に座るときは、身体をまっすぐ前に向けて座ってください。座面に対して斜めや横向きに座ると、バランスを崩して転倒する恐れがあります。		



⚠ 警告

座面について	⊘	座面に座ったまま、車体を前後に動かさないでください。
		勢いよく座らないでください。車体に変形したり、破損する恐れがあります。
		車体を折りたたんだ状態で座らないでください。
		分解・修理の際は自身で行わず、お買い上げの販売店までご連絡ください。

⚠ 注意

!	!	折りたたみや調節（各部の固定など）は確実に行ってください。また、指などをはさまないように注意してください。	
		ご使用前には各部を点検し、フレームや各部に亀裂、破損、変形などが見られる場合は使用しないでください。	
		ハンドブレーキと駐車ロックを使用する際には、左右の後輪が確実に固定されていることを確認してください。	
		ブレーキを解除したときには、後輪がスムーズに回転することを確認してください。	
		ブレーキワイヤーの先端が足に当たらないようにしてください。けがの原因になります。	
		ネジなどにゆるみがないこと、グリップがしっかりと固定されていることを確認してください。	
		タイヤやブレーキに磨耗がないことを確認し、必要に応じて交換してください。交換する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
⊘	⊘	ご使用の際は、必ずご自身の体調を確認し、安全に使用できるかどうかを判断してください。体調によっては、転倒などの思わぬ事故につながる恐れがあります。	
		左右のハンドルの高さが異なる状態で使用しないでください。転倒による事故やけがの原因になります。	
歩行のとき	!	トレイに最大積載荷重（3kg）を超えるものを載せないでください。	
		踏切を横断する際は、踏切レールの隙間に注意し、路線に対して直角に横断してください。	
		⊘	ハンドブレーキを握った状態や駐車ロックをかけた状態で歩行しないでください。
		⊘	車体から離れるときは、必ず駐車ロックをかけてください。また、非常口や消火器、消火栓の前に放置しないでください。
		⊘	坂道では駐車しないでください。坂道では、たとえ駐車ロックをかけても動くことがあり、大変危険です。
		⊘	座面に人を乗せたまま押さないでください。
座面について	!	グリップに勢いよく負荷をかけないでください。	
		!	ペットの散歩には使用しないでください。転倒などの思わぬ事故につながる恐れがあります。
		!	座面シートパーツが劣化した場合は、交換が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。
		!	座面に買い物カゴを乗せる場合は、必ず買い物カゴ脱落防止フックを使用して、買い物カゴを固定してください。
収納バッグについて	⊘	坂道など斜面では座らないでください。	
		⊘	座面に浅く座らないでください。
		⊘	座面を踏み台として使用しないでください。
		⊘	幼児や子供を座面に立たせたり、操作させたりしないでください。
トレイについて	!	収納バッグに荷物を入れた状態で折りたたまないでください。	
		!	収納バッグの中に、貴重品を入れたまま車体からはなれないでください。
		!	収納バッグの中に、刃物など鋭利な物を入れないでください。
	⊘	⊘	収納バッグの中に、最大積載荷重（5kg）を超えるものを入れないでください。
		!	トレイに物を載せて移動する際は落下しないように注意してご使用ください。
		!	トレイを直接持って脱着すると破損する恐れがありますので、必ず左右の丸棒を持って脱着してください。
		!	座面を使用する際はトレイを下げてください。
		!	トレイ装着の際は確実に丸棒が背もたれパイプ取り付け穴に取り付いていることを確認してください。歩行中にトレイが外れたり、載せたものが倒れることがあります。
		⊘	トレイに強い衝撃を与えないでください。トレイが破損する恐れがあります。また、トレイに熱湯や刃物など怪我の恐れがある物は絶対に載せないでください。
		⊘	トレイには最大積載荷重を超えるものを載せないでください。破損や転倒をする恐れがあります。（トレイの最大積載荷重 3kg）
⊘	トレイに座らないでください、転倒や故障の原因になります。		
⊘	トレイに背の高い物を載せないでください。転倒することで怪我をする恐れがあります。		
⊘	トレイには乳幼児を乗せないでください。転倒してケガをする恐れがあります。		
⊘	トレイに物を載せた状態で脱着しないでください。		
⊘	トレイに物を載せた状態でトレイを装着しないでください。		
⊘	買い物カゴを積載した状態でトレイを装着しないでください。		


各部のなまえ

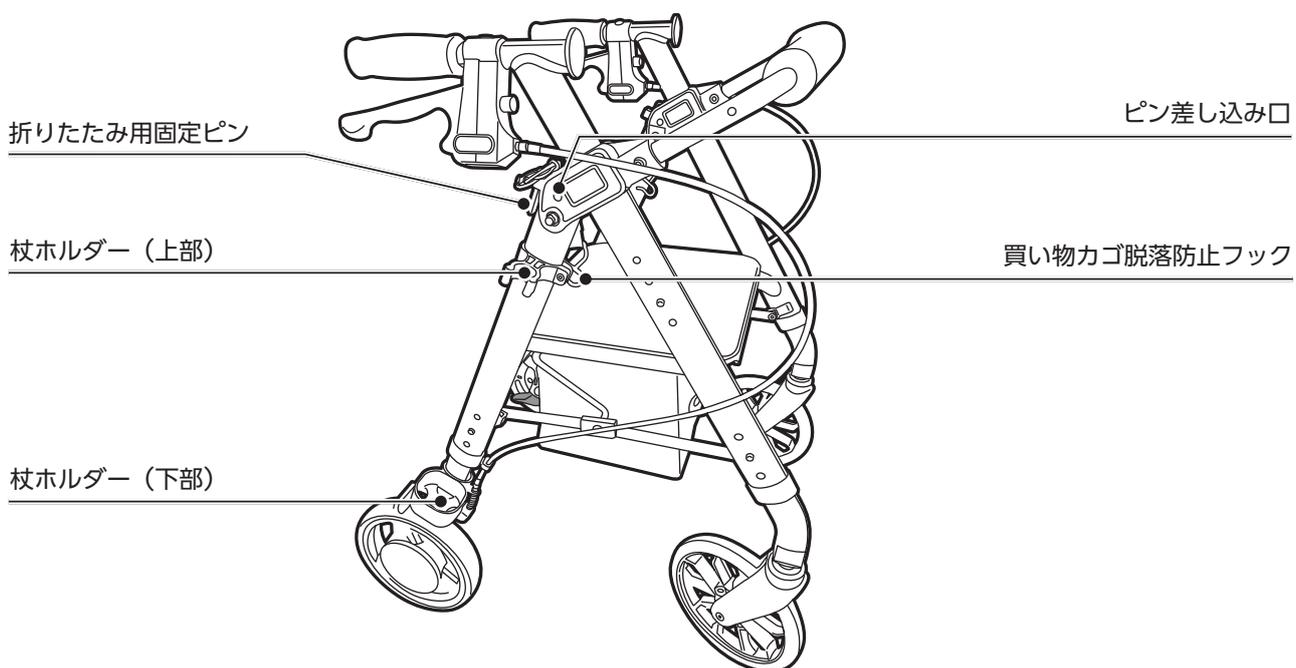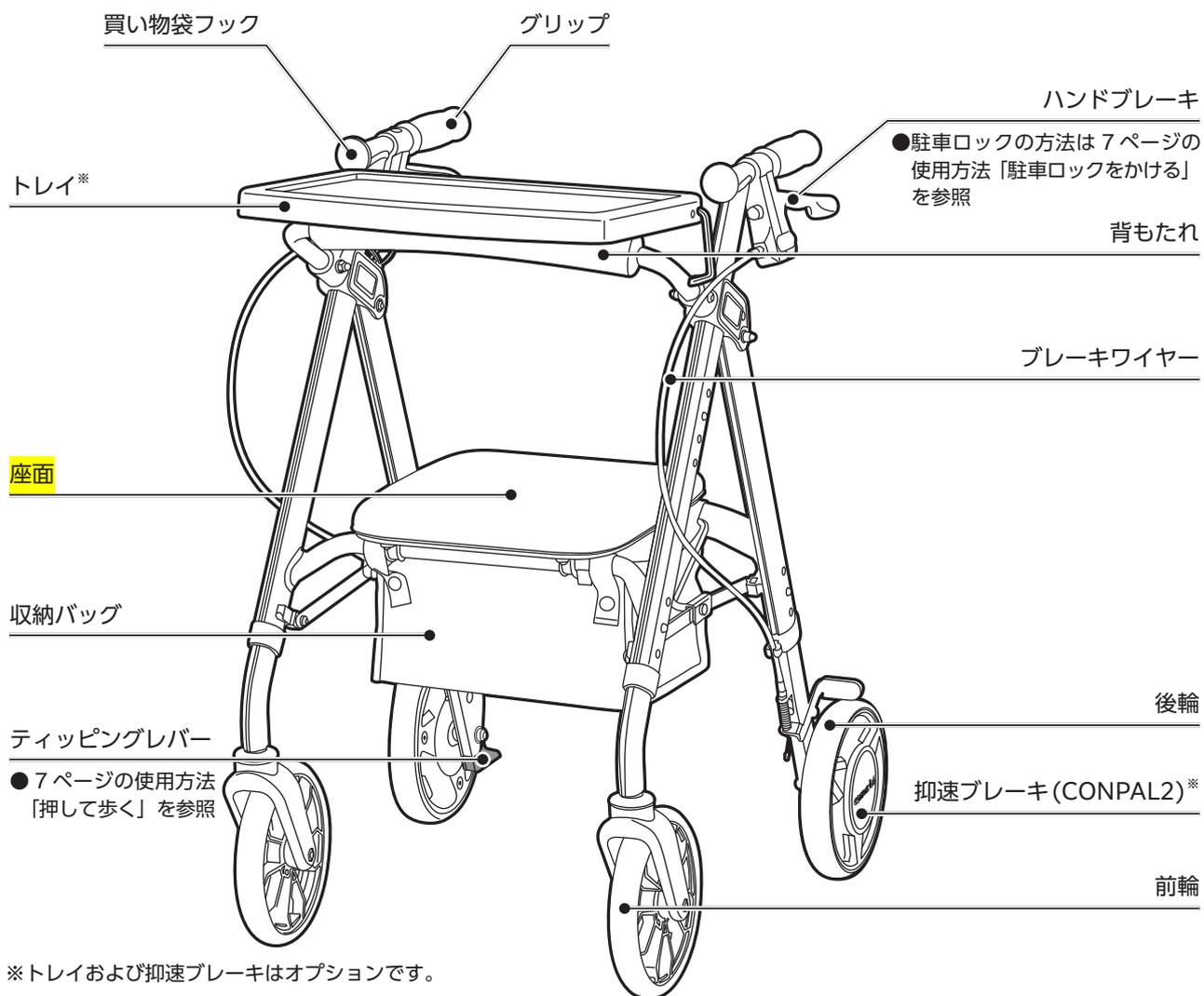


使用前の準備

車体を開く

- 1 支柱上部の折りたたみ用固定ピンを抜きます。

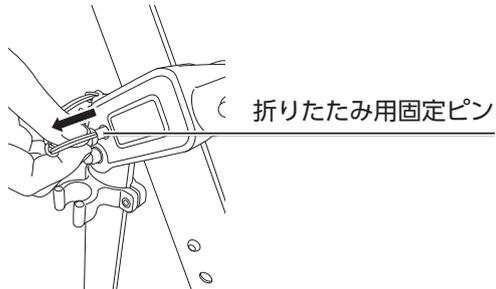


- 2 折りたたみ用取手を下方方向に押して、本体を開きます。

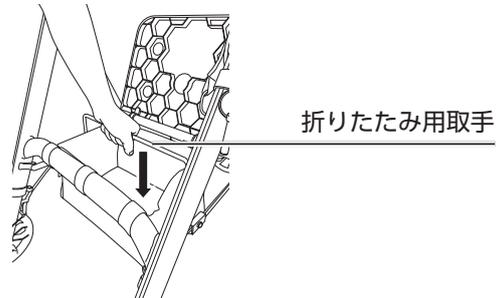


! 車体を開く際、フレームに手を挟まないようご注意ください。

車体をたたむ


- 1 座面を開きます。

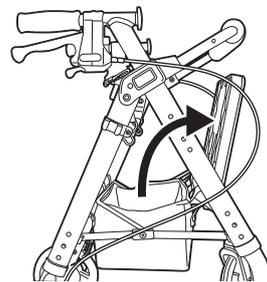

- 2 折りたたみ用取手を上方方向に引いて、本体を折りたたみます。

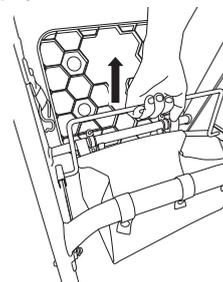

- 3 折りたたみ用固定ピンを、ピン差し込み口に差し込みます。

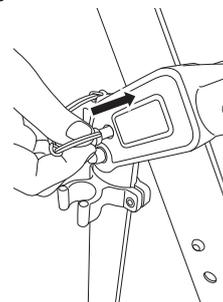


使用前の準備（つづき）

グリップの高さを調節する

押しボタンを押し込み、「カチッ」と音が鳴る位置まで動かして高さを調節します。

- ・押しボタンが適切な位置まで飛び出している（固定されている）ことを確認してください。
- ・グリップの高さは4段階に調節できます。左右2か所を同じ高さに設定してください。

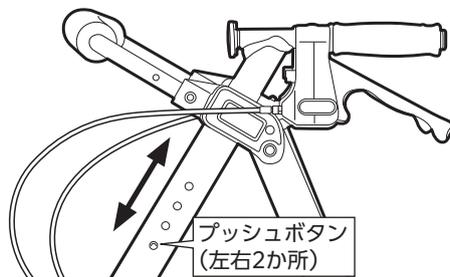


⊘ 左右のグリップ（2か所）は、高さが違う状態で使用しないでください。転倒による事故やけがの原因になります。

座面の高さを調節する

押しボタンを押し込み、「カチッ」と音が鳴る位置まで動かして高さを調節します。

- ・押しボタンが適切な位置まで飛び出している（固定されている）ことを確認してください。
- ・座面の高さは3段階に調節できます。脚部の前後左右4か所を同じ高さに設定してください。

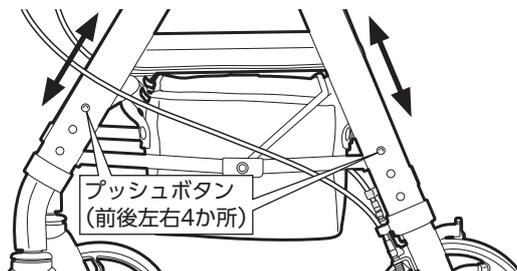


⊘ 前後左右の脚部（4か所）は、高さが違う状態で使用しないでください。転倒による事故やけがの原因になります。

トレイ（オプション）を取り付ける

トレイの丸棒（左右2か所）をフレームに差し込みます。

- ・丸棒の先とフレームが干渉し傷がつかないようにご注意ください。

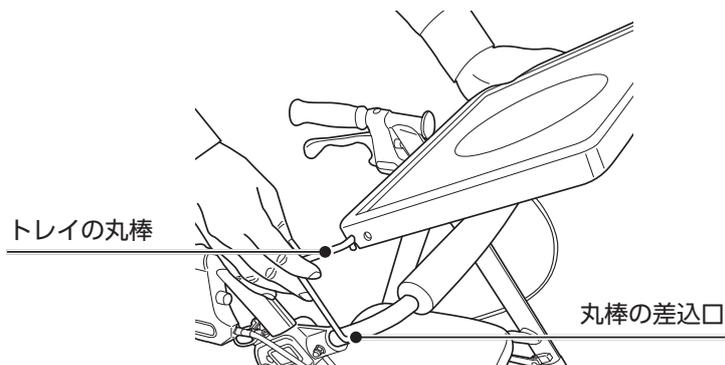


抑速ブレーキ（オプション）を調整する

オプションの抑速ブレーキ（CONPAL2）を調整する場合は、CONPAL2の取扱説明書をご参照ください。

使用方法


ハンドブレーキをかける

グリップを持ち、ハンドブレーキを握るとブレーキがかかります。

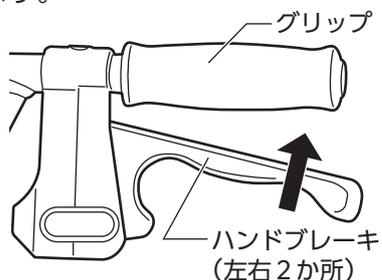

駐車ロックをかける

ハンドブレーキを押し下げると、後輪が固定され駐車ロックがかかります。

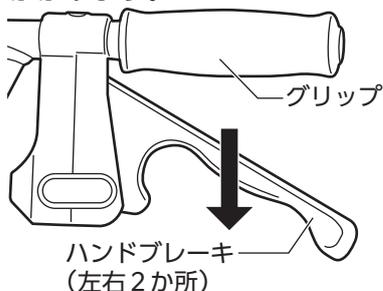

押して歩く

歩行時は以下のことに注意してください。事故や転倒によるけがの原因となります。




- ハンドルは両手で操作してください。
- ハンドブレーキは左右同時にかけてください。
- 歩行時は駐車ロックが左右とも解除されていることを確認してください。



- グリップに体重をかけすぎないでください。
- 杖ホルダー（下部）に足を掛けしないでください。
- グリップを持ったまま後退しないでください。

歩行中に段差がある場合、ティッピングレバー（後輪のオレンジ色部分）を踏むことで前輪を持ち上げることができます。

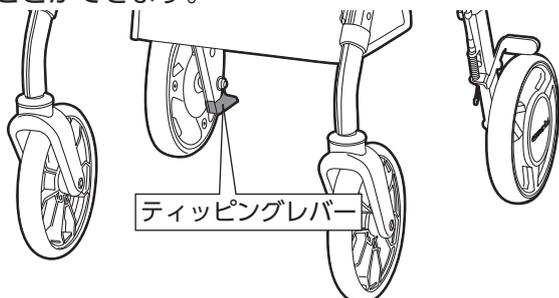


買い物カゴを載せる

スーパーやコンビニで買い物をする際、座面に買い物カゴを載せることができます。



- 買い物カゴは座面の中央に載せてください。
- 座面に買い物カゴを載せる場合、買い物カゴ脱落防止フックをカゴに掛けて固定してください。

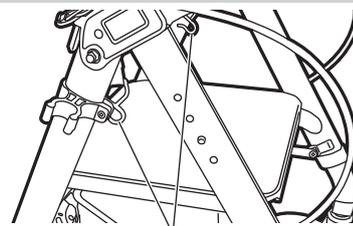

買い物カゴ脱落防止フック

買い物袋を吊り下げる

グリップ前方の買い物袋フックに、買い物袋などを吊り下げることができます。

買い物袋フック




- 買い物袋フックに2kg以上の荷物を吊り下げないでください。
- 買い物カゴ脱落防止フックには荷物を吊り下げないでください。
- 買い物袋は座面側（内側）に吊り下げてください。

使用方法（つづき）

杖を固定する

杖ホルダー（下部）に杖の先端を差し込み、杖ホルダー（上部）に杖を固定することができます。

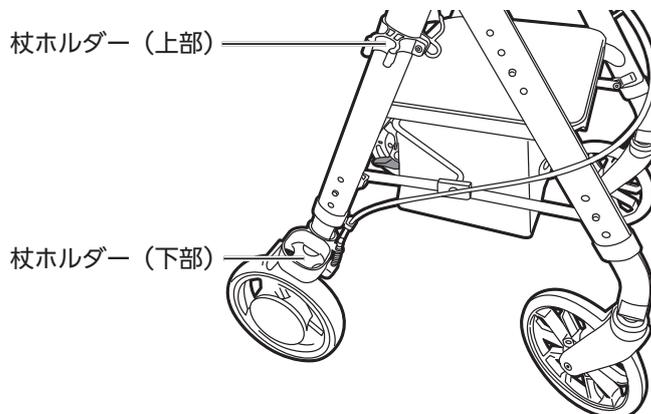

- 杖の直径が太い場合、無理に押し込まないでください。杖ホルダーが破損する恐れがあります。
- 確実に杖が固定されていることを確認してください。
- 杖ホルダーに、傘など杖以外のものを固定しないでください。
- 杖の先端は、確実に杖ホルダー（下部）に入れてください。

座面に腰掛ける


腰掛ける際は以下のことに注意してください。事故や転倒によるけがの原因となります。



背もたれに背中が付くように、座面には深く腰掛けてください。



背もたれに体重をかけて寄りかからないでください。

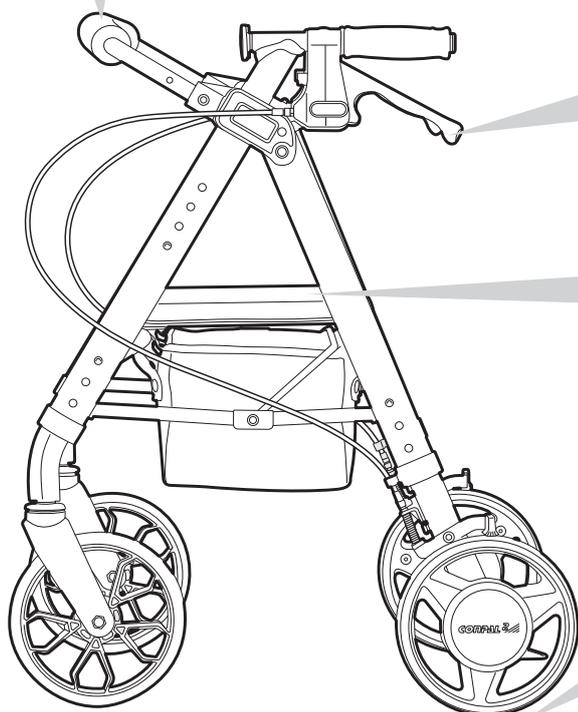

腰掛ける前に、駐車ロックが左右ともかかっていることを確認してください。



座面に座った状態で駐車ロックを解除しないでください。



座面には深く腰掛けてください。浅く座ると転倒の恐れがあります。



平坦で安定した場所で腰掛けてください。




傾いた場所では腰掛けないでください。

メンテナンス・保管


ブレーキの調節について

ブレーキが緩い場合

- 1 ラジオペンチ等で、後輪上部のナットを固定します。

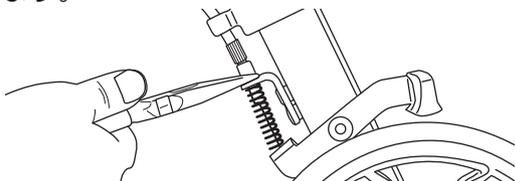


- 2 アジャスターボルトを回し、上の位置に固定するとブレーキレバーが固くなります。

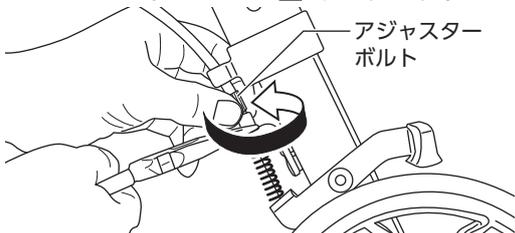

ブレーキが固い場合

- 1 ラジオペンチ等で、後輪上部のナットを固定します。

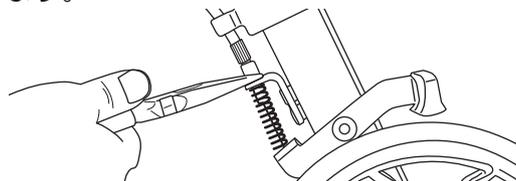

- 2 アジャスターボルトを回し、下の位置に固定するとブレーキレバーが緩みます。




! ブレーキを調節してもブレーキが効かない場合、タイヤや本体の交換が必要なことがあります。詳細は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


座面の交換について

・座面が劣化した場合、交換することができます。詳細は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

- 1 2層になっている座面の上部分を、下図のように取り外します。

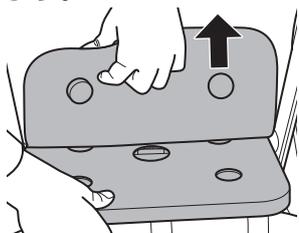

- 2 新しい座面裏側の突起部分（4か所）を、本体のくぼみに合わせて押しこみ、座面を取り付けます。（浮き上がる部分がないようにしっかりと押しつけてください。）

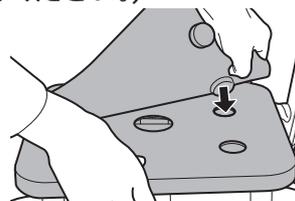

お手入れ方法

・汚れがひどい場合は、中性洗剤を染み込ませた布で汚れをふきとり、その後、水でぬらした布で洗剤をふきとり、よく乾かしてください。

! 雨などで濡れたときは、乾いた布で拭き取ってください。泥やほこりがついたときは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。

・座面の汚れは水で洗い流し、その後よく乾かしてください。

⊘ 研磨剤入りのスポンジは絶対に使用しないでください。
・塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。

メンテナンス・保管（つづき）

保管方法

- ❗ ・屋内で保管してください。また、長期間使用しないときは、汚れを落としてから保管してください。
- ⊘ ・雨ざらしになる場所、高温多湿な場所、直射日光が当たる場所では保管しないでください。故障や変形・破損の原因となります。
- ⊘ ・車体を倒した状態で、車体の上に荷物を載せないでください。故障や変形・破損の原因となります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	ここをお確かめください	対処方法
ブレーキのききが悪い	タイヤがすり減っていませんか。	お買い上げの販売店にお問い合わせください。
	ブレーキに異常はありませんか。	ブレーキの調節（⇒9ページ）をしてください。調節しても改善しない場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
走行操作が重い	車輪にゴミや異物が挟まっていませんか。	ゴミや異物を取り除いてください。
抑速ブレーキ付後輪が作動時にこすれるような音がする	抑速ブレーキは摩擦式のため、こすれるような音が多少発生しますが、故障ではありません。また、その音は温度や湿度などの環境によって変化する場合があります。	—

- ❗ 上記の対処をしても良くならない場合、またはいずれの症状も当てはまらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

仕様

商品名	アルコーステラ	アルコーステラ 抑速ブレーキ付き	アルコーステラ トレイ付き	アルコーステラ 抑速ブレーキ・トレイ付き
品番	100660	100661	100662	100663
JANコード	4537711006602	4537711006619	4537711006626	4537711006633
TAISコード	00125-000110	00125-000111	00125-000112	00125-000113
材質	アルミ			
本体サイズ(mm)	幅529×奥行641×高さ772～889mm			
重量	8kg	9.2kg	8.9kg	10.1kg
キャスター	8インチ	8インチ 後輪/CONPAL2	8インチ	8インチ 後輪/CONPAL2
高さ調節	プッシュボタン式 12段階（脚部3段階+グリップ部4段階）772～889mm			
最大使用者体重	100kg			
最大積載荷重 (収納バッグ)	5kg			
最大積載荷重 (トレイ)	—	—	3kg	3kg

保証とアフターサービス

1.保証書

保証書は必ず所定の事項を記入のうえ大切に保管して下さい。

2.修理を依頼される時

以下の内容をご確認のうえお買い上げの販売店までご連絡下さい。

●連絡していただきたい内容

品名とお買い上げ日

破損・異常の内容をできるだけ詳しく

施設名、お名前、ご住所、電話番号

●保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。

ただし、保証期間内でも有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた後は

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は

補修用性能部品は製造打切り後5年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.ご相談について

お手入れ・お取り扱い方法などでお困りの場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせ下さい。

保証書

品名	
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	

【保証規定】

- 1.この商品の保証期間はお買い上げの日より1年間です。
- 2.保証期間内は部品の欠落や加工不良など、メーカーの責任によるものは無償で修理いたします。
- 3.次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - a. 使用上の誤りや取扱い不注意による故障・損傷
 - b. 弊社以外で行われた不当な修理や改造による故障・損傷
 - c. タイヤ・車輪・ブレーキパッドの自然消耗
 - d. 地震や風水害などの天災及び事故や火災などによる故障・損傷
 - e. 間違った使用方法で生じた故障・損傷
 - f. 気温・湿度などが特殊な環境の中で使用して生じた故障・損傷
 - g. 取扱説明書に従わないで生じた故障・損傷
 - h. 日本国外でご使用の場合
- 4.一度使用したものは原則として製品のお取替えは出来ません。
- 5.この商品を第三者にお譲りになれる場合、本書も必ずあわせてお渡し下さい。
- 6.この保証書がない場合は保証対象外になります。

株式会社 **星光医療器製作所**

本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6
TEL (072) 870-1912(代)
FAX (072) 870-1915

URL <https://www.seiko-aruko.jp/>
E-mail office@aruko.co.jp

(2024年9月)